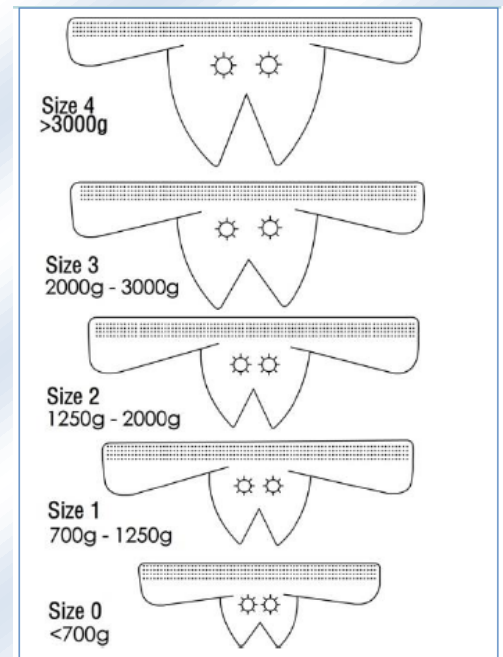


Plastry ochronno- uszczelniające **Neo-Guard**

*Gwarantowane uszczelnienie kaniul do CPAP
wraz z ich stabilnym mocowaniem.*



WŁAŚCIWOŚCI

- ❖ Silikonowy materiał o właściwościach adhezyjnych zastosowany w plastrach Neo-Guard jest hypoalergiczny, delikatny dla skóry, bez domieszki kleju.
- ❖ Plastry Neo-Guard zapobiegają bezpośredniemu kontaktowi kaniul z nosem dziecka, co chroni przed uszkodzeniem przegrody nosowej i podrażnieniu błon śluzowych nosa.
- ❖ Neo-Guard pomaga w osiągnięciu stałego ciśnienia CPAP
- ❖ Szeroka gama wielkości plastrów Neo-Guard (pięć rozmiarów) zapewnia możliwość zastosowania ze wszystkimi kaniulami nosowymi dostępnymi na rynku medycznym na całym świecie.
- ❖ Plastry Neo-Guard dedykowane są **dla noworodków z masą urodzeniową <700g do masy > 3000g**, umożliwiają zastosowanie ich u małych pacjentów w każdym okresie rozwoju.

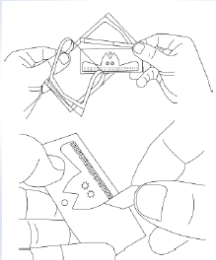
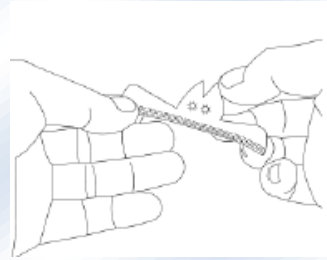


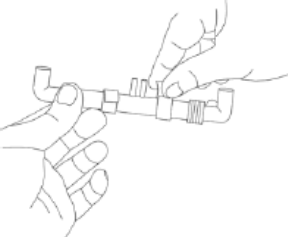
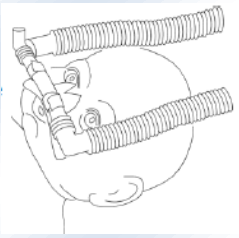
Instrukcja użycia Neo-Guard

(plastry ochronno-uszczelniające)

Korzystając z przewodnika rozmiarów Neo-Guard, wybierz rozmiar najbardziej odpowiedni dla Twojego pacjenta.

Waga noworodka (przybliżona)	Rozmiar Neo-Guard
<700 g	0
700g do 1250g	1
1250g do 2000g	2
2000g do 3000g	3
>3000g	4

1. Upewnij się, że obszar nosa dziecka jest całkowicie czysty i suchy przez delikatne umycie wodą. Pomoże to w przyleganiu Neo-Guard.

<p>2.</p> 	<p>Delikatnie usuń Neo-Guard z opakowania, starając się nie napinać podkładu silikonowego.</p>	<p>3.</p> 	<p>Przyłóż górną i dolną część plastra Neo-Guard i upewnij się, że rozmiar został dobrze wybrany.</p>
<p>4.</p> 	<p>Umieść Neo-Guard na nosie dziecka, upewniając się, że otwory wyrównują się z nozdrzami.</p>	<p>5.</p> 	<p>Delikatnie wygładź płatki Neo-Guard po obu stronach nosa, upewniając się, że nie ma zagnieceń ani guzków, które mogą powodować ucisk.</p>
<p>6.</p> 	<p>Owiń bawełnianą tasiemką rurkę NCPAP, aby zapewnić przyczepność do Neo-Guard.</p>	<p>7.</p> 	<p>Delikatnie umieść końcówki NCPAP w otworach znajdujących się w Neo-Guard.</p>

Uwaga: Rozmiar otworu w Neo-Guard może wydawać się mniejszy niż kaniule donosowe. Otwory mają nacięcia, które umożliwiają utrzymanie prawidłowej pozycji kaniul NCPAP na właściwym miejscu. Zapewnia to utrzymanie prawidłowego ciśnienia i minimalizuje przecieki.

Pomocne wskazówki:

Dwa paski z rzepami dołączone do zestawu Neo-Guard zapewniają prawidłowe i stabilne mocowanie kaniul donosowych.

WAŻNE! Przed użyciem rozgrzej Neo-Guard (pozostaw w inkubatorze na krótki okres).

Nie próbuj rozciągać Neo-Guard! Hydrokoloid zawsze będzie wracał do oryginalnego kształtu i długości, co może powodować odciąganie materiału od skóry noworodka albo będzie powodowało marszczenie skóry noworodka.



KONTAKT:

WARDA Sp. z o.o.

ul. Korzenna 5, Przyłęki, 86-005 Białe Błota

tel.: 607151979, Fax: 52 5610863

e-mail: biuro@warda-warda.pl, www.warda-warda.pl