



Bezklejowe mocowania ochronne Neo-Strip

Dla bezpiecznego podłączenia kaniul (HFNC)

Zastosowanie mocowania Neo-Strip umożliwia bezpieczne umieszczenie kaniul nosowych bez narażenia małego pacjenta na uszkodzenie wrażliwej skóry.

- Mocowanie Neo-Strip jest wykonane z materiału silikonowego o właściwościach adhezyjnych, dzięki czemu delikatnie przylega do wrażliwej na bodźce zewnętrzne skóry dziecka.
- Mocowanie Neo-Strip nie powoduje uszkodzeń skóry noworodka.

<p>Neo-Strip jest zestawem na który składa się delikatny rzep na podkładzie silikonowym, który po umieszczeniu na skórze noworodka (pod noskiem) delikatnie do niej przylega.</p>	<p>Do każdego Neo-Strip dołączono tasiemkę bawełnianą, którą należy owinąć wokół kaniuli.</p>	<p>Tak przygotowaną kaniulę należy przyklepić do delikatnego rzepa.</p>

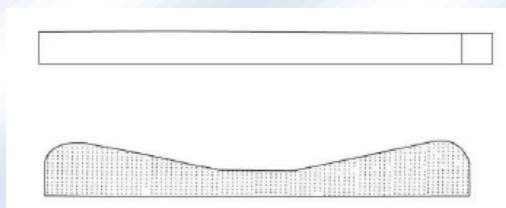
Opis	Nr katalogowy	Ilość w opakowaniu [szt.]
Neo-Strip	NS001	50

WŁAŚCIWOŚCI

- Neo Strip został opracowany w celu zastąpienia przyklepców, które mogą podrażniać delikatną skórę noworodka.
- System Neo-Strip oferuje repozycjonowanie za pomocą zestawu na który składa się miękki pasek rzepowy na bazie warstwy silikonowej oraz tasiemki bawełnianej;
- Tasiemkę należy użyć celem owinięcia drenu i następnie przymocować do delikatnego paska rzepowego, umieszczonego pod noskiem pacjenta;
- Materiał silikonowy użyty w Neo-Strip jest hypoalergiczny i delikatny dla skóry małego pacjenta.

Instrukcja użycia Neo-Strip

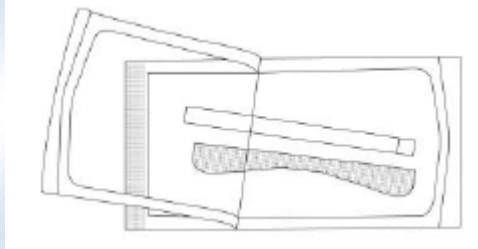
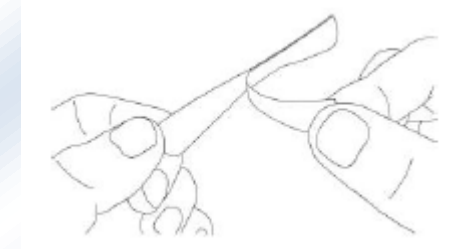

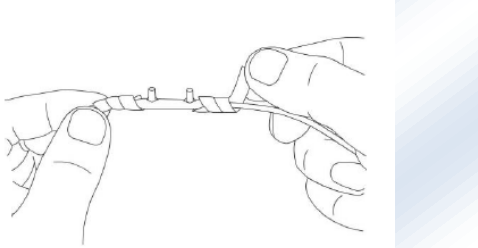


Mocowanie Neo-Strip składa się z dwóch elementów, tj.:



- tasiemki bawełnianej

- delikatnego paska rzepowego z warstwą silikonu.

Przed zamocowaniem Neo-Strip upewnij się, że obszar nosa dziecka jest całkowicie czysty przez delikatne umycie wodą. Czynności te zapewnią właściwe umieszczenie Neo-Strip.

		
1. Otwórz opakowanie i delikatnie wyjmij elementy składowe mocowania Neo-Strip, starając się nie rozciągać materiału silikonowego.	2. Ostrożnie zdejmij pasek z powierzchni silikonowej. Unikaj dotyku bezpośredniego warstwy silikonowej.	3. Umieść Neo-Strip poziomo między nosem a górną wargą i wygładź naklejoną powierzchnię z każdej strony nosa, usuwając wszelkie zagniecenia i grudki.
		
4. Owiń bawełnianą tasiemkę wokół kaniuli.	5. Delikatnie, ale zdecydowanie umieść owiniętą kaniulę na pasku silikonowym Neo-Strip	6. Właściwie umieszczony Neo-Strip.

WAŻNE!

Przed użyciem rozgrzej Neo-Strip w inkubatorze (pozostaw w inkubatorze na krótki okres).

Nie próbuj rozciągać Neo-Strip! Warstwa silikonu zawsze będzie wracała do oryginalnego kształtu i długości, co może powodować odciąganie materiału od skóry noworodka albo będzie powodowało marszczenie skóry noworodka.

KONTAKT:

WARDA Sp. z o.o.

ul. Korzenna 5, Przyłęki, 86-005 Białe Błota

tel.: 607151979, Fax: 52 5610863

e-mail: biuro@warda-warda.pl, www.warda-warda.pl

