

Mocowania ochronne Neo-Velum

Bezpieczeństwo w zastosowaniu drenów medycznych.



Opis	Ilość / rozmiar	Nr kat.	Ilość szt. w pudełku	Przeznaczenie
Neo-Velum Singlet	1 szt./op. (5 x3,5 cm)	NV-SINGLET	50	<ul style="list-style-type: none"> Noworodki do lat 2 – mocowanie drenów
Neo-Velub Doublet	2szt./op. (3 x3 cm)	NV-DOUBLET	50	<ul style="list-style-type: none"> Noworodki do lat 2 - mocowanie drenów tlenowych oraz kaniul CPAP
Neo-Velub Doublet MINI	2szt./op. (2,5 x 2,5cm)	NV-DOUBLET MINI	50	<ul style="list-style-type: none"> WCZEŚNIAKI i noworodki do lat 2 -mocowanie drenów tlenowych oraz kaniul CPAP
Ne-Velum Mono	1 szt./op. (3 x3 cm)	NV-MONO	50	<ul style="list-style-type: none"> Dzieci (od 2 do8 lat) - mocowanie drenów



WŁAŚCIWOŚCI

- ❖ Neo-Velum jest owalnym mocowaniem na bazie warstwy silikonowej, o charakterze sandwiczowym (kanapkowym) z przezroczystą, zabezpieczającą osłoną zewnętrzną.
- ❖ Dzięki wyjątkowej konstrukcji mocowania Neo-Velum dren/cewnik umieszczony pomiędzy silikonowym podkładem a przezroczystą osłoną jest bezpieczny i stabilnie umocowany.
- ❖ Powierzchnia silikonowa Neo-Velum przylega łagodnie do skóry pacjenta (wrażenie kleistości), zachowując przyleganie nawet na mokrej, spoconej skórze.
- ❖ Neo-Velum jest dedykowany do każdego rodzaju dostępnych na rynku drenów/cewników.
- ❖ Neo-Velum jest prostym i skutecznym sposobem mocowania.
- ❖ Neo-Velum jest hypoalergiczny, nie zawiera lateksu ani kleju.

Instrukcja użycia Neo-Velum



1. Upewnij się, że obszar mocowania Neo-Velum jest całkowicie czysty i suchy przez delikatne umycie wodą i wysuszenie.

Uwaga: Nie należy nakładać kremów i maści na okolicę stosowania Neo-Velum, ponieważ wpłynie to na przyczepność.

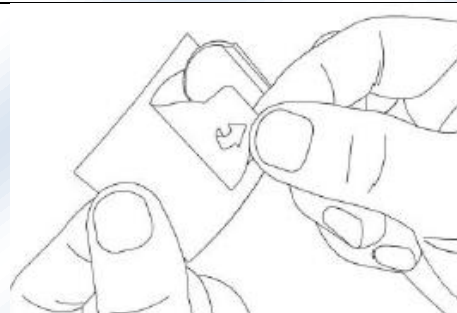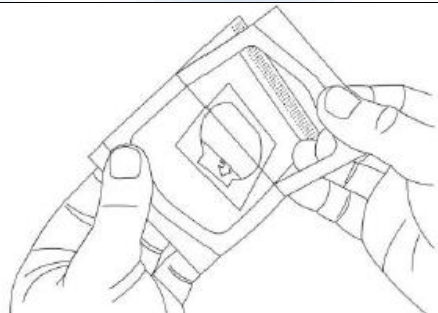



2. Otwórz Neo-Velum oddzielając przezroczystą folię zabezpieczającą.

3. Delikatnie wyjmij Neo-Velum z opakowania, starając się nie rozciągać materiału silikonowego.

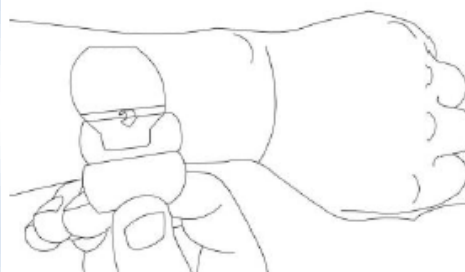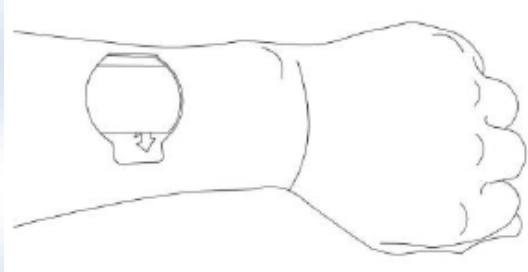

3. Umieść Neo-Velum na skórze i wygładź wszelkie zagniecenia lub pęcherzyki.


4. Zdejmij biały podkład z przezroczystego, samoprzylepnego listka.

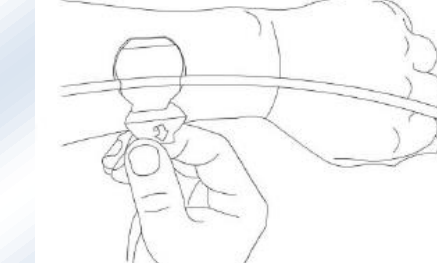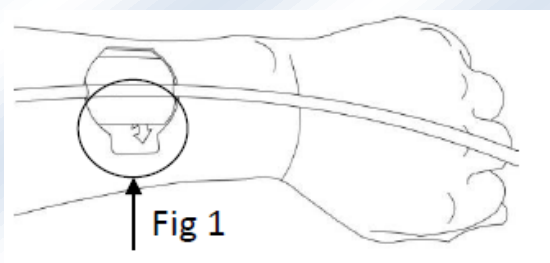

6. Umieść dren/ cewnik między klejącym listkiem a silikonem. Następnie zamknij listek nad drenem/cewnikiem. Wygładź powierzchnię listka klejącego.

7. Usuń przezroczystą plastikową warstwę, tak jak wskazują niebieskie strzałki (Fig. 1).

8. Dren jest teraz bezpiecznie przymocowany do pacjenta.

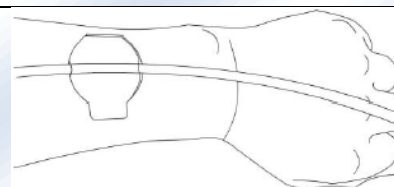

KONTAKT:

WARDA Sp. z o.o.

ul. Korzenna 5, Przyłęki, 86-005 Białe Błota

tel.: 607151979, Fax: 52 5610863

e-mail: biuro@warda-warda.pl, www.warda-warda.pl

