



Narzędzie na smartfona umożliwiające natychmiastowy pomiar bilirubiny.

Poprawa jakości leczenia żółtaczki

Prosty pomiar


Proste i bezpieczne rozwiązanie.
Wystarczy smartfon (Android/iOS) i karta kalibracyjna.

Łatwy w użyciu

Aby określić poziom bilirubiny, aplikacja automatycznie wykonuje serię zdjęć skóry noworodka wraz z kartą kalibracyjną i wysyła je do opracowania dokładnego wyniku przy zastosowaniu opatentowanych algorytmów.

Komfort

Szybki rezultat zmniejsza niepokój rodziców i personelu medycznego, oraz zapobiega niepotrzebnym wizytom w szpitalu.

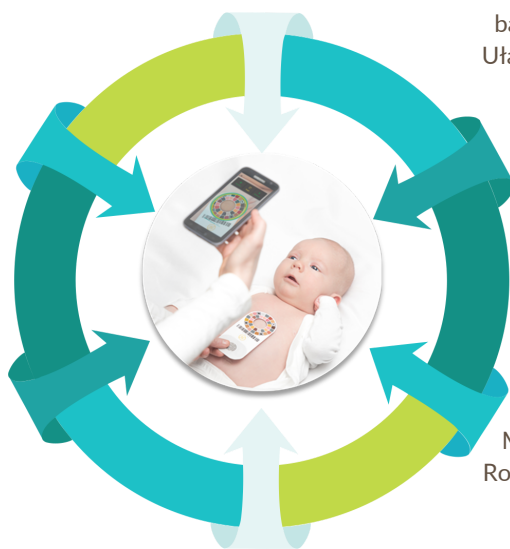

Ekonomiczne i dostępne


Niedrogie, dokładne i dostępne rozwiązanie do badań przesiewowych w kierunku żółtaczki. Ułatwia diagnozowanie noworodków na całym świecie.

Efektywne czasowo

Unikaj niepotrzebnych wizyt w szpitalu i ponownych hospitalizacji. Natychmiastowe rezultaty.

Zdalny monitoring

Monitoruje poziom bilirubiny u noworodków. Rodzice/opiekunowie mogą przeprowadzić wiele badań domowych i skonsultować wyniki z personelem medycznym.

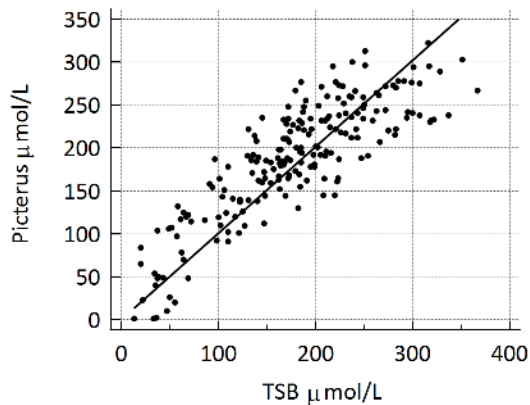

Dane kliniczne dotyczące noworodków (n=201)
Szpital św. Olafa w Trondheim w Norwegii

Picterus[®] JP przebadał tysiące dzieci na całym świecie pod kątem żółtaczki.

Przeprowadzone metody analizy wykazują wysoką korelację między pomiarami bilirubiny Picterus[®] JP a wartościami bilirubiny całkowitej w surowicy (TSB). Badania walidacyjne przeprowadzone w szpitalu St. Olav w Norwegii wykazały korelację $r=0,84$ pomiędzy obiema metodami. Picterus[®] JP wykazał się wysoką czułością (94%) w wykrywaniu ciężkiej żółtaczki, zdefiniowanej jako $TSB > 250 \mu\text{mol/l}$ i utrzymywał wysoką swoistość (71%).

**Chcesz dowiedzieć się więcej lub kupić karty kalibracyjne?
Prosimy o kontakt: biuro@warda-warda.pl, Tel.607151979**



Link do publikacji
i badań
klinicznych

Niedrogie, dokładne i dostępne rozwiązanie do badań przesiewowych w kierunku żółtaczki.
Ułatwia diagnozowanie noworodków na całym świecie.

**“To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.”**



UNIWERSALNA SILIKONOWA TAŚMA BEZ BÓLU - SIL FIXX

- MIĘKKA, PRZEZROCZYSTA I GIĘTKA TAŚMA NIE USZKADZA I NIE DEPILUJE SKÓRY
- TAŚMA JEST WODOODPORNĄ I POSIADA DOSKONAŁE WŁAŚCIWOŚCI PRZYLEGANIA (ADHEZJA)
- MOŻNA PONOWNIE NAKŁADAĆ NA SKÓRĘ
- 1,9 cm x 150 cm
- 2,5cm x 150 cm
- 2,5cm x 500 cm
- 5,0cm x 500 cm



UNIWERSALNE, ADHEZYJNE (BEZ KLEJU) WORECZKI DO MOCZU NOWORODKÓW - NEO ORIS

- GWARANCJA WŁAŚCIWEGO POBORU MOCZU PRZEZ RODZICA.
- HIPOALERGICZNE
- ŁATWE REPOZYCJONOWANIE W PRZYPADKU ZŁEGO PRZYKLEJENIA
- POJEMNOŚĆ: 75ml lub 100 ml



ROGALE POZYCJONUJĄCE NOWORODKA

- WYPEŁNIONE W 70% DROBNYM GRANULATEM EPS
- POSZCIE PODUSZKI ZMYWALNE I DEZYNFEKOWALNE
- POSZEWKA Z FLANELI

W OFERCIE MODELE NADAJĄCE SIĘ DO POZYCJONOWANIA W ŁÓŻKU LUB DO KARMIEŃIA



OKLAND POZYCJONERY

- ZAPOBIEGAJĄ POWSTAWANIU ODLEŻYN I OWRZODZEŃ
- ŁATWE W UTRZYMANIU CZYSTOŚCI
- WYSOKA JAKOŚĆ POLIMERU
- HIPOALERGICZNE

WARDA

Kontakt: WARDA Sp. z o.o.
ul. Korzenna 5, Przyłęki, 86-005 Białe Błota
tel.: 607151979, Fax: 52 5610863
e-mail: biuro@warda-warda.pl, www.wardamed.pl

**“To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą”.**