


Wysokochłonne plastry ochronno-uszczelniające **Neo-Guard PLUS**

*Piankowe, dobrze wchłaniające wilgoć uszczelnienie kaniul do CPAP
wraz z ich stabilnym mocowaniem.*



- Upewnij się, że okolice nosa dziecka są całkowicie czyste i suche, delikatnie myjąc je wodą. Pomoże to w przyczepności Neo-Guard Plus.
- Wyjmij Neo-Guard Plus z opakowania i oderwij go od folii podkładowej.

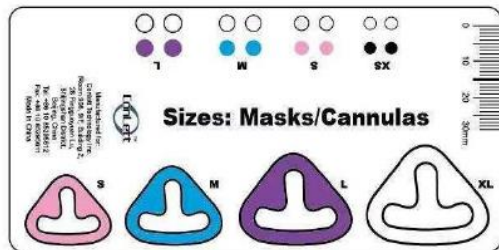

1. Korzystając z dostarczonej linijki Neo-Guard Plus, wybierz rozmiar odpowiadający sprzętowi CPAP używanemu u pacjenta. Wybrany Neo-Guard Plus powinien albo być nieco mniejsze niż używana maska lub mieć otwory nieco mniejsze niż wybrane kaniule.



4. Umieść Neo-Guard Plus na nosie dziecka, upewniając się, że otwory pokrywają się z nozdrzami.

5. Jeśli ustawienie Neo-Guard po pierwszej próbie nie jest idealne, można je usunąć i ponownie nałożyć, aż do osiągnięcia idealnej pozycji.

- Zabezpiecz odpowiednio maskę i kaniule. Kaniule donosowe będą wykazywać niewielki opór podczas wchodzenia w otwory, gdy wycięte w gwiazdę otwory rozszerzają się, tworząc uszczelnienie wokół zębów.

Nr kat.	Opis	Rozmiar Sugerowana waga	Ilość szt. / op.
NGP-S-M	Neo-Guard-Plus <2000g	< 2000g	50
NGP-M-L	Neo-Guard-Plus >2000g	>2000g	50