

	Instrukcja użytkowania daisygrip wielorazowa, bezpieczna, magnetyczna opaska uciskowa	Ostatnia aktualizacja 01/2025
---	---	--

Wskazanie

Zastój krwi w celu dożylnego nakłucia naczyń w celu pobrania krwi / założenia dostępu dożylnego

Przeciwwskazania

Wadliwa bariera skórna, stan zapalny skóry, znana alergia na używany materiał

1. Aplikacja bez szczypania	
Podczas zaciskania umieść palec wskazujący między paskiem/sprzączką a skórą. Ciśnienie stazy ok. 40 mmHg (pomiędzy rozkurczowym ciśnieniem tętniczym ok. 80 mmHg, a ciśnieniem refluku żylnego ok. 20 mmHg).	
2. Najpierw poluzuj, a następnie przesun, aby otworzyć	
Aby zmniejszyć nacisk i poluzować stażę, po prostu przechył „pokrywę” daisygrip w kierunku paska. Aby otworzyć: przesun klamrę na bok kciukiem.	
3. Dezynfekcja	
	• Chusteczki dezynfekujące do powierzchni. • Całkowicie zwilż powierzchnie silikonowego paska i klamry. • Przesun dolną część klamry na całej długości paska. • Uwzględnij czas kontaktu (zwykle 1 minutę). • Alkohole, aldehydy, związki nadtlenkowe (<5%) i związki czwartorzędowe zgodnie z listą środków dezynfekujących VAH (Association for Applied Hygiene)

Materiał: Klamra: Kopoliester; Opaska / taśma: silikon (bez lateksu / lateksu)

Utylizacja: Okres użytkowania został przetestowany laboratoryjnie przez okres równoważny dwóm latom średniego zużycia. Następnie lub gdy widoczne będzie zmęczenie materiału, należy go zutylizować zgodnie z przepisami zasady higieny wewnętrznej. O ile nie zaznaczono inaczej, po czyszczeniu należy go wyrzucić jako odpad resztkowy.



daisygrip GmbH
Rostocker Str. 37
18196 Kavelstorf



	Instrukcja użytkowania daisygrip wielorazowa, bezpieczna, magnetyczna opaska uciskowa	Ostatnia aktualizacja 01/2025
---	--	---

Instrukcje bezpieczeństwa:

- Produkt medyczny klasa I zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym wyrobów medycznych (UE) 2017/745;
- Do stosowania procedury dezynfekcji należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących materiałów medycznych;
- W przypadku skażenia wydzielinami, innymi płynami ustrojowymi lub substancjami toksycznymi prosimy o zachowanie higieny i w razie wątpliwości wyrzucić opaskę uciskową jako odpad specjalny;
- Podczas otwierania klamry należy zachować ostrożność;
- W przypadku poważnych przypadków należy zgłosić to firmie daisygrip GmbH i odpowiednim władzom;
- Zastosowanie w zakresie temperatur od -10°C do 80°C;
- Nie sterylizować opaski żyłnej ciepłem; jeśli to się wydarzyło przypadkowo, należy sprawdzić i potwierdzić poprawność funkcji, zanim będzie można ją ponownie zastosować u pacjenta;
- Przed każdym użyciem sprawdzić czy pasek/zapięcie nie nosi śladów użycia;
- W razie potrzeby zmyć lepkie pozostałości środka dezynfekcyjnego ciepłą wodą;
- Wyrzucić opaskę uciskową z widocznym zużyciem opaski/zamka;
- Nie umieszczać zapięcia bezpośrednio na rozruszniku serca i nie używać w badaniach MRI;
- Stosować u dzieci wyłącznie w obecności pracowników służby zdrowia, nie pozostawiać bez nadzoru; istnieje ryzyko uduszenia;
- Opaskę daisygrip można poddać działaniu promieniowania UV-C;; nie spowoduje to uszkodzenia funkcjonalności;
- Ograniczenia: ekspozycja na promieniowanie UV-C może prowadzić jedynie do zmiany koloru.

Wyłączny przedstawiciel na Polskę

WARDA

tel.: 575 070 463, 792 080 689

www.wardamed.pl

kontakt@warda-warda.pl

To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
Produkt zgłoszony do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

daisygrip GmbH
Rostocker Str. 37
18196 Kavelstorf

