



THERMOCARE

Ciepłe łóżeczko dla naszych
najmłodszych.
Przytulne i bezpieczne.

THERMOCARE

Linia produktów THERMOCARE jest wynikiem wielu dziesięcioleci doświadczeń w dziedzinie zapewnienia optymalnego komfortu termicznego noworodków. Potrzeby pacjenta są zawsze w centrum uwagi firmy WEYER.

Ciepłe łóżeczko THERMOCARE tworzy idealne i stabilne warunki termiczne wspierając rozwój małego pacjenta.

Odpowiednia wersja dla Twoich potrzeb:



THERMOCARE K

Ciepłe łóżeczko z ogrzewaniem podmateracowym;
wysokość statyczna lub regulacja wysokości



THERMOCARE C

Ciepłe łóżeczko z promiennikiem ciepła;
wysokość statyczna lub regulacja wysokości



THERMOCARE KCE

Ciepłe łóżeczko z ogrzewaniem podmateracowym i promiennikiem o regulowanej wysokości

Dodatkowo:

- Ścianki boczne wysokości 170 mm lub 250 mm
- Osłona/Baldachim jednoczęściowy lub dwuczęściowy



Skoncentruj uwagę na pacjencie

Ciepłe łóżeczko THERMOCARE zapewnia optymalne warunki pracy dla personelu medycznego. Konstrukcja ciepłego łóżeczka umożliwia przechylenie jego jedną ręką w górę i w dół, nie narażając pacjenta na wahania temperatury. Regulacja kąta nachylenia łóżeczka nie powoduje zmian odległości od innych urządzeń medycznych, do których podłączony jest noworodek.

Wszystkie ścianki boczne łóżeczka w łatwy sposób można złożyć jedną ręką i mogą być schowane bezpośrednio przy łóżeczku, nie utrudniając dostępu do noworodka.

Niezbędne rzeczy zawsze pod ręką

Wszystkie niezbędne przedmioty służące do pielęgnacji noworodka mogą być umieszczone w pojemnikach, które otwierają się w taki sposób, aby były dostępne ze wszystkich stron i w każdej sytuacji.





Wygoda, bezpieczeństwo i niezawodność

Przyjazny wybór ogrzewania

W zależności od modelu ciepłe łóżeczka THERMOCARE mogą być wyposażone w **promiennik ciepła**. Ogrzewanie promiennikiem jest delikatne i gwarantuje komfort ciepły pacjenta.

Aktywnie podgrzewany materacyk żelowy

W zależności od konfiguracji łóżeczka THERMOCARE aktywnie podgrzewany **podkład żelowy** wspomaga stabilizację temperatury ciała noworodka. Duża pojemność cieplna materacyka żelowego zabezpiecza równowagę termiczną niemowlęcia i wspomaga ocieplenie pacjenta z hipotermii.

Miękka powierzchnia materacyka żelowego przeciwdziała odleżynom.

Promiennik ciepła i podgrzewany żelowy materacyk

Połączenie długofalowego promieniowania podczerwonego i ciepła przekazywanego przez żelowy materacyk jest najlepszym rozwiązaniem zapewniającym neutralne środowisko termiczne w opiece medycznej.

Regulacja wysokości

Wysokość łóżeczka można płynnie regulować za pomocą dwóch pedałów umieszczonych w podstawie urządzenia.

Oświetlenie

U noworodków i niemowląt powinno się unikać stosowania rażącego światła punkowego.

Światło emitowane z dużej powierzchni promiennika THERMOCARE zapewnia właściwe oświetlenie łóżeczka bez niepotrzebnego stresu noworodka związanego z nagłym, punktowym włączeniem światła. Mali pacjenci zachowują dzięki temu spokój i czują się przytulnie.

Intensywność podświetlania można regulować w 5 poziomach, w zależności od potrzeb. Optymalne oświetlenie jest zawsze dostępne - w dzień i w nocy.




Wbudowany zegar

Cyfrowy zegar wbudowany w promienniki ciepła, może być wykorzystany jako:

- **Cyfrowy zegar Apgar** – wskazanie po 1, 5 i 10 minutach;
- **Stoper** z możliwością pomiaru czasu do 60 min;
- **Minutnik** z dźwiękowym sygnałem po upływie nastawionego czasu;

Istnieje możliwość zatrzymania zegara, co jest pomocne w wielu aplikacjach.

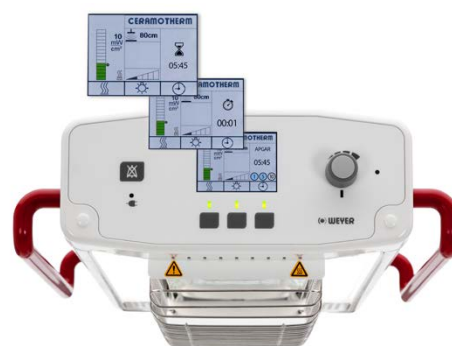

Mobilność łóżeczka

Solidne, gładkie podwójne kółka zapewniają stabilną pozycję ciepłego łóżeczka THERMOCARE i swobodne jego przemieszczanie. Blokada jednego z kółek umożliwia swobodne manewrowanie, a odbojniki chronią łóżeczko przed przypadkowym zderzeniem z ewentualnymi przeszkodami.



Bezpieczeństwo

Ciepłe łóżeczka THERMOCARE zostały zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie pacjenta i ergonomii. W razie uszkodzenia materacyka nie następuje wyciek żelowej substancji/ polimeru.

Metalowa osłona promiennika zabezpiecza przypadkowemu poparzeniu przez elementy grzewcze urządzenia. Blokada ustawionych parametrów promiennika uniemożliwia ich przypadkową zmianę.



Gwarancja jakości

Urządzenia THERMOCARE są zaprojektowane i produkowane w Niemczech, zgodnie z aktualnymi wytycznymi bezpieczeństwa i najwyższymi standardami jakości. Zastosowanie wysokiej jakości materiałów i solidne wykonanie gwarantują długą żywotność urządzeń medycznych firmy WEYER.

Urządzenia współpracujące

Urządzenia WEYER stanowią unikalną linię produktów, której komponenty i elementy są kompatybilne. Są to między innymi:



Mieszalnik
REANIMAT®-O2-Blend



Ogrzewacz/Promiennik
CERAMOTHERM®



Urządzenie do fototerapii
BILICOMPACT®



Tablet grzewczy
THERMOCARE Convenience



Otwarte stanowisko intensywnej opieki
VARIO THERM®



Inkubator hybrydowy
THERMOCARE Vita

KONFIGURACJE

- ☐ wersja podstawowa
☒ akcesoria

Wszystkie urządzenia THERMOCARE zawierają:

gładkie podwójne kółka – szt.4, tj.: 3 z całkowitą blokadą,
 1 ze sterowaną blokadą; Łóżecko o wymiarach 480 x 760 mm
 z podniesionymi bokami; Regulacja nachylenia łóżecka: głowa
 w górę / stopy dół i stopy w górę / pozycja w dół regulowana
 w zakresie 0 - 12 °; przyciski startowe – szt.3.

Konfiguracja urządzenia podstawowego	Nr kat.	THERMOCARE K z ogrzewanym materacem		THERMOCARE C z promieniowaniem ciepła		THERMOCARE KCE z ogrzewanym materacem i promiennikiem ciepła
		Wysokość statyczna	Regulacja wysokości	Wysokość statyczna	Regulacja wysokości	Regulacja wysokości
Ogrzewana podstawa łóżecka z żelowym materacem		☐	☐	–	–	☐
Regulacja wysokości łóżecka w przedziale: 850 - 1150 mm		–	☐	–	☐	☐
Metalowy stelaż na promiennik ciepła oraz inne akcesoria		–	–	☐	☐	☐
Ogrzewacz ciepła/promiennik/ CERAMOTHERM®		–	–	☐	☐	☐

Ścianki boczne

(WY3021 lub WY3022) należy dodatkowo zamówić

Bezpieczne ścianki boczne o wysokości 250 mm, składane	WY3021	☒	☒	☒	☒	☒
Jednoczęściowa pokrywa do montażu na ściankach bocznych o wysokości 250 mm (WY3021)	WY3024	☒	☒	☒	☒	☒
Pokrywa dwuczęściowa do montażu na ściankach bocznych o wysokości 250 mm (WY3021)	WY3025	☒	☒	☒	☒	☒
Bezpieczne ścianki boczne o wysokości 170 mm, składane	WY3022	☒	☒	☒	☒	☒

Akcesoria

Szyna montażowa na filarze; max. 4 szyny na urządzeniu	WY3035	☒	☒	☒	☒	☒
Szuflada łukowato wysuwająca się na obie strony; zamocowana na szynie WY3035, max. 2 szuflady na urządzeniu	WY3036	☒	☒	☒	☒	☒
Dodatkowa para pedałów do regulacji wysokości	WY3032	–	☒	–	☒	☒
Wsparcie dla dostosowania 2 rur Ø 27 mm	WY3051	☒	☒	–	–	–
Komplet rurek Ø 27 mm, długość 650 mm do umocowania dodatkowych akcesoriów	WY3055	☒	☒	–	–	–
Półka 420 x 280 mm, mocowana do rur Ø 27 mm i Ø 40	WY3060	☒	☒	☒	☒	☒
Półka 240 x 320 mm, zamocowana na zespole rur Ø 27 mm	WY3061	☒	☒	☒	☒	☒
Szyna przyrządowa zamocowana na zespole rury Ø 27 mm	WY3064	☒	☒	☒	☒	☒
Uchwyt do mieszalnika z regulacją wysokości, zamocowany na zespole rur Ø 27 mm.	WY3067	–	–	☒	☒	☒
Ostona/baldachim na łóżecko, podłączona z WY3055	WY3070	☒	☒	–	–	–
Uchwyt do rur oddechowych, zamocowany w rogu łóżka	WY3075	☒	☒	☒	☒	☒

DANE TECHNICZNE:

		THERMOCARE K Wysokość statyczna, z ogrzewanym materacem	THERMOCARE K Regulacja wysokości, z ogrzewanym materacem	THERMOCARE C Wysokość statyczna, z promieniowaniem ciepła	THERMOCARE C Regulacja wysokości, z promieniowaniem ciepła	THERMOCARE KCE z ogrzewanym materacem i promiennikiem ciepła
Parametry elektryczne	Ogrzewanie materaca	180 W	180 W	-	-	180 W
	Filar/noga z płynną regulacją	-	120 W	-	120 W	120 W
	Promiennik ciepła CERAMOTHERM	-	-	690 W	690 W	690 W
	Liczba możliwych akcesoriów do podłączenia/ gniazda wejściowe	3	3	3	3	2
	Max. moc wejściowa	2300 W				
	Napięcie	230 V / 50 - 60 Hz				
Parametry eksploatacyjne	Regulacja kąta nachylenia płaszczyzny łożeczka: głowa do góry/ stopy w dół i stopy do góry / głowa w dół	12°				
	Materac	żel PU		pianka PU		żel PU
	Zakres temp. ogrzewania materaca Standard: 35 - 37 ° C; Zakres rozszerzony: 30 - 38,5 ° C	Tak	Tak	-	-	Tak
	Oświetlenie	-	-	LED 2 x 850 lm - z możliwością ściemniania		
	Temperatura barwowa	-	-	4000 K		
	Materiał elementu grzewczego promiennika / długość fali światła	-	-	Ceramiczny / 1.5 – 6.8 μm		
	Wybór intensywności promieniowania	-	-	2 – 20 mW/cm²		
	Funkcja automatycznej redukcji intensywności światła	-	-	Tak		
	Wyświetlanie wybranej i aktualnej wartości oraz ciepła resztkowego	Tak				
	Masa urządzenia	66 kg	72 kg	73 kg	79 kg	80 kg
	Klasyfikacja zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG	II a		II a		II b



Weyer GmbH
Herrenhöhe 4, D-51515 Kürten-Herweg
Tel.: (+49) 02207 9698-0
Fax.: (+49) 02207 4750
E-Mail: info@weyermed.com
www.weyermed.com



POLSKA
Warda Sp. z o.o.
ul. Korzenna 5, Przytęki, 86-005 Białe Błota
tel.: 607151979,
Fax: 52 5610863
e-mail: biuro@warda-warda.pl
www.warda-warda.pl

